


AmonMed

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

- ze slin
- notifikován pro sebetestování
- jednoduchý, přesný, rychlý

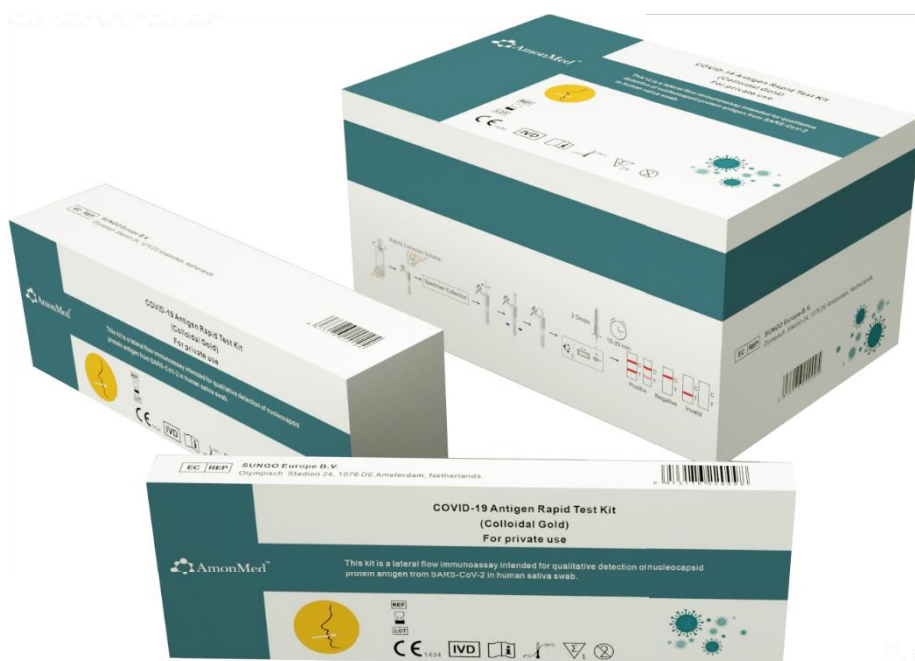

Rychlá testovací souprava COVID-19 Antigen Test Kit (koloidní zlato) využívá technologii imunochromatografie k detekci COVID-19 antigenu ve vzorcích lidských slin.

Balení : 1 test v krabičce.

Cena: **52,- Kč** 52,- Kč bez DPH

Objednávky:

EXBIO Olomouc s.r.o.

Ovesná 14

779 00 Olomouc


Tel. 587 301 011

Email: objednavky@exbio.com

www.exbio.com



Testovací postup

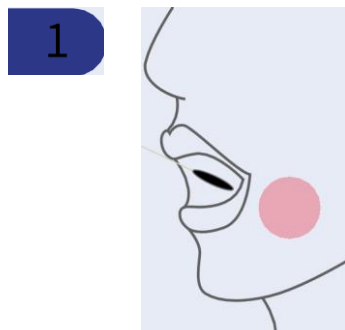

1 Odeberte vzorek slin výtěrovým tamponem.




2 Vytlačte veškerý extrakční roztok z lahvičky do extrakční zkumavky.




3 Vložte výtěrový tampon do extrakční zkumavky. Otáčejte tamponem více než pětkrát. Ponechte tampon v extrakční zkumavce asi 1 minutu. Vyjměte tampon a přitom stlačujte stěny zkumavky, abyste z tamponu získali co nejvíc tekutiny.



4 Pevně přitlačte uzávěr s kapátkem do extrakční zkumavky.

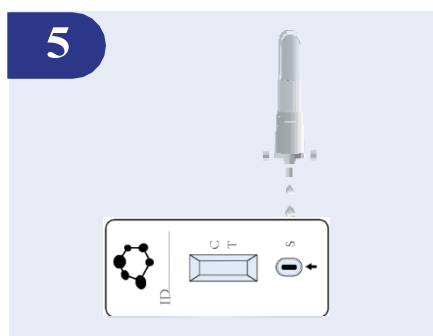


5 Naneste 2 kapky extrahovaného vzorku do jamky pro vzorek na testovací kazetě.

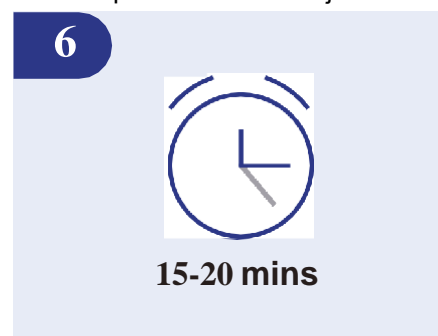


6 Výsledek testu odečtete po 15-20 minutách.

Interpretace výsledků


Negative

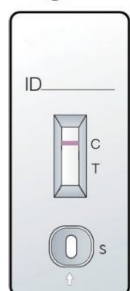

Positive

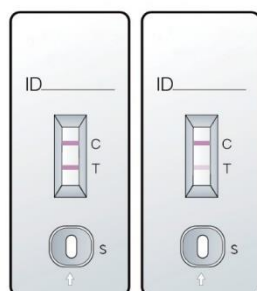

Invalid

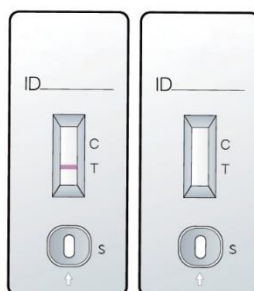

Výkonnostní charakteristiky :

Citlivost: 96,55 %

Specifita: > 99 %

